

Ora-Aid

cerotto per medicazione intraorale



ORA 202
15 x 25 mm



ORA 205
15 x 20 mm



CURATICK
10 mm



GUARDA LE
VIDEO-ISTRUZIONI



scopri di più su
ora-aid.it

prodotto da



TBM Co., Ltd.
B-301,313, Cheomdangwagi-ro, buk-gu, Gwangju, Korea, 61008
tel. +82 62 971 2845 fax +82 62 971 2815
www.tbmkorea.com

distribuito da



ROEN S.a.s. di Boarolo Paolo e Marco & C.
Via Torino, 23 - 10044 Pianezza (TO)
tel. +39 011 9682604
www.roen.it - info@roen.it

DELFIG PARTNERS

Ora-Aid

cerotto per medicazione intraorale




visita
ora-aid.it

CARATTERISTICHE e BENEFICI

Per la medicazione e la protezione di ferite e lesioni nel cavo orale.

Privo di eugenolo.

- Nuovo concetto di medicazione intraorale;
- Protegge ferite e lesioni dal cibo, dai batteri e dal fumo di sigaretta;
- Dotato di una forte capacità adesiva grazie al polimero idrofilo;
- Facile da tagliare e modellare;
- La saliva ne aumenta il potere adesivo;
- Riduce la sensazione di irritazione;
- Pratico e facile da usare;
- Il profumo di menta aiuta a ridurre l'alitosi;
- Contiene Vitamina E.

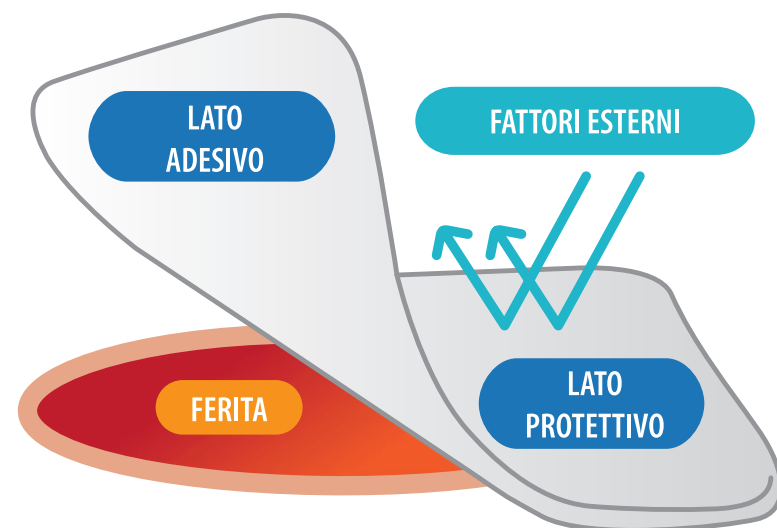

INDICAZIONI

Applicabile in tutti i casi di ferite, lesioni o irritazioni nel cavo orale.

- Favorisce la guarigione dopo interventi chirurgici;
- Ferite aperte o con punti di sutura;
- In alcuni casi può sostituire la sutura;
- Ulcere e afte;
- Allevia l'irritazione causata da trattamenti ortodontici;
- Protegge le suture dal contatto con la lingua;
- Protegge lo smalto e i denti sensibili;
- Rinfresca la bocca dopo interventi chirurgici;
- Aiuta l'emostasi.



ISTRUZIONI e CONSERVAZIONE

Istruzioni

- ① Irrigare la ferita con soluzione sterile o salina;
- ② Tagliare Ora-Aid in una forma e misura adatta;
- ③ Asciugare la ferita dall'umidità dolcemente con una garza. Un'essudazione eccessiva può ridurre la forza adesiva e la sua durata;
- ④ Rimuovere la pellicola trasparente e applicare sulla ferita;
- ⑤ Premere delicatamente Ora-Aid per 5-10 secondi fino a che Ora-Aid aderisca alla ferita (in alcuni casi è necessario ripetere la pressione).

Conservazione

- ① Conservare il prodotto a temperatura ambiente (1°C~35°C), lontano da fonti dirette di luce e calore;
- ② Il mancato rispetto delle norme di conservazione può causare una riduzione delle prestazioni del prodotto (adesività, riassorbimento).

PRECAUZIONI E CAUTELE

Precauzioni

- ① Leggere attentamente le avvertenze prima dell'uso;
- ② Non utilizzare il prodotto se esso appare danneggiato o contaminato prima dell'uso (alcune bollicine sulla superficie del prodotto sono causate dal processo produttivo e quindi innocue);
- ③ È un dispositivo medico monouso. Se riutilizzato, il prodotto potrebbe causare infezione, contaminazione e infiammazione.

Cautele durante l'utilizzo

- ① Se si manifestano gonfiore, reazioni allergiche, nausea o segni di infezione, consultare un medico;
- ② Non utilizzare su ferite profonde con sanguinamento eccessivo;
- ③ Non rimuovere Ora-Aid con forza: la parte adesiva si dissolve e cade automaticamente.
- ④ Rimuovere dalla ferita la parte che non ha aderito bene.

